

PORTUGUÊS

DEFINIÇÃO: Pontas para aspiração. **COMPOSIÇÃO:** Polipropileno. **ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES:** Descartar após o uso. **INSTRUÇÕES DE USO:** 1. Desinfecte as pontas através da imersão por 30 minutos em Solução de Hipoclorito de Sódio a 1% ou Solução Álcool Etilico a 70%; 2. Lave em água corrente para remover resíduos seguido de secagem com ar comprimido; 3. Adapte as pontas às cânulas para aspiração. Obs.: Se necessário, faça a curvatura das pontas através de pressão na direção e inclinação desejada.

ENGLISH

DEFINITION: Aspirating tips. **COMPOSITION:** Polypropylene. **WARNING/PRECAUTIONS:** Disposable after use. **INSTRUCTIONS FOR USE:** 1. Disinfect the tips by immersion in 1% sodium hypochlorite or 70% ethanol for 30 minutes; 2. Wash with water to remove debris and dry with air; 3. Attach tips to cannulas for suction. Obs.: If necessary, the tips may be bended by curving them towards the required direction and inclination.

ESPAÑOL

DEFINICIÓN: Puntas para aspiración. **COMPOSICIÓN:** Polipropileno. **ADVERTENCIA/PRECAUCIONES:** Desechables

después de su uso. **INSTRUCCIÓN DE USO:** 1. Desinfecte las puntas sumergiéndolas en una solución de hipoclorito de sodio al 1% o en alcohol etílico al 70%; 2. Lave en agua corriente para remover residuos seguido de secado con aire comprimido; 3. Adapte las puntas a las cánulas para aspiración. Obs.: Si es necesario, haga la curvatura de las puntas por medio de presión en la dirección e inclinación deseada.

For the digital instructions, please visit this QR code.



1150816 - 0818052023

ATENÇÃO: Este produto deve ser usado de acordo com as instruções deste manual. O fabricante não é responsável por falhas ou danos causados pela utilização incorreta deste produto ou pela sua utilização em situações de não conformidade com este manual.

ATTENTION: This product must be used according to the instructions described in this manual. The manufacturer is not responsible for failure or damage caused by incorrect handling or use.

ATENCIÓN: Este producto debe ser usado de acuerdo con las instrucciones de este manual. El fabricante no es responsable por fallos o daños causados por la utilización incorrecta de este producto, o por su utilización en situaciones que no estén de acuerdo con este manual.